


Entnahmeanleitung für eine Vollblut-Analyse

- Senden Sie für die Vollblut-Spektralanalyse ausschließlich unbehandeltes Venenblut.
- Verwenden Sie nur unsere Versandgefäße mit Ammoniumheparinat.
- Sofort nach Einfüllen des Blutes das Röhrchen mehrere Male kippen.
- Bitte das Blut **nicht zentrifugieren!**
- Die Blutprobe ist temperaturunabhängig und kann zeitlich unbegrenzt gelagert werden oder auf dem Postweg (in dem beigelegten bruchsicheren Schutzgefäß) versendet werden.
- Zu jeder eingesandten Probe muß ein ausgefüllter Labor- bzw. Anmeldebogen beigelegt werden.
- Für die Vollblut-Analyse senden wir Ihnen auf Wunsch unser Spezialröhrchen zu, mit welchem Sie die Blutabnahme bei Ihrem Haus- oder Vertrauensarzt durchführen lassen können. Hierzu händigen Sie dem Arzt bitte diese unten angeführte Entnahmeanleitung aus.

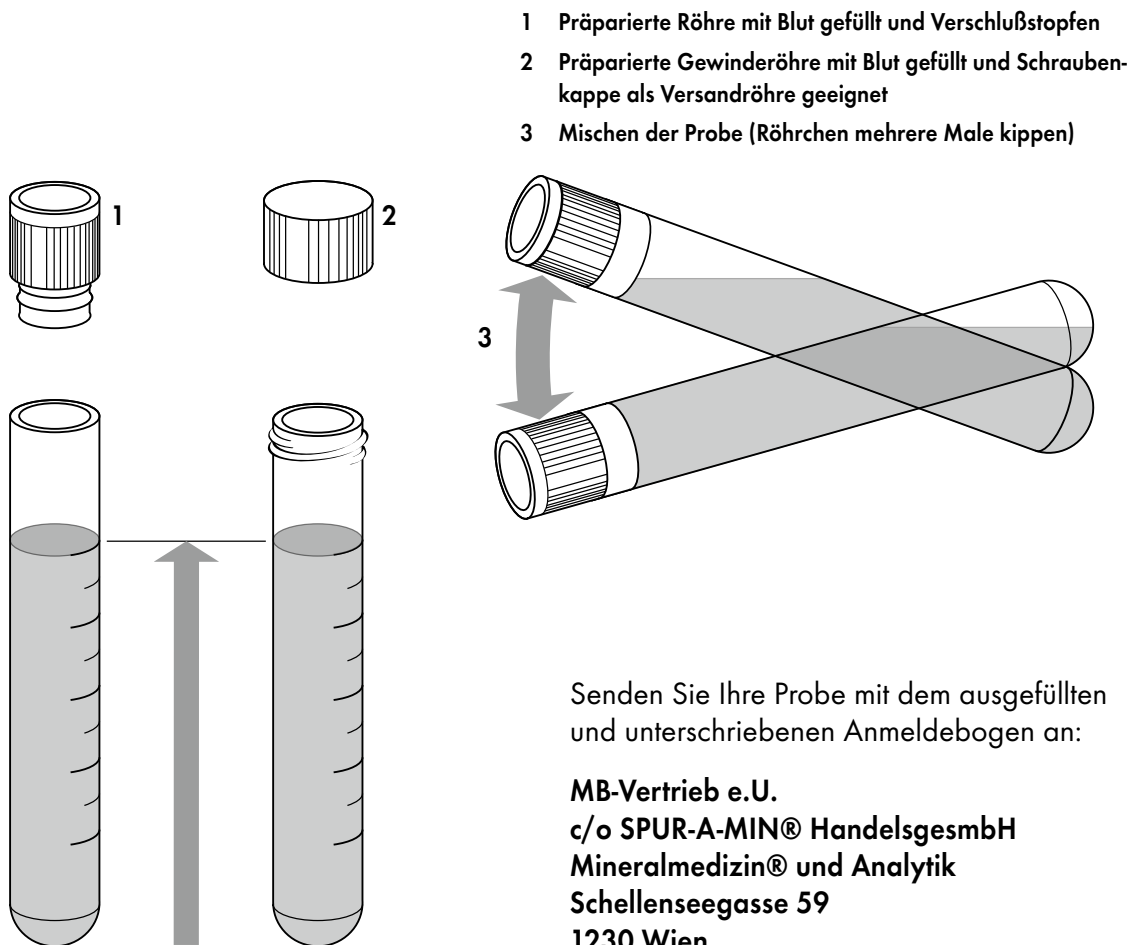

Senden Sie Ihre Probe mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldebogen an:

MB-Vertrieb e.U.
c/o SPUR-A-MIN® HandelsgesmbH
Mineralmedizin® und Analytik
Schellenseegasse 59
1230 Wien